

GUIA DE MEDIDAS

WISEIRA/MÁSCARA EQUIVIZOR

GUIA DE MEDIDAS

A seguir apresentamos passo a passo as instruções para a escolha do tamanho das Viseiras e Máscaras da Linha EQUIVIZOR.

Em caso de dúvidas, favor, entre em contato com a AUSPEMvet: contato@auspemvet.com.

Para a definição do tamanho das Viseiras e Máscaras da Linha EQUIVIZOR, duas medidas devem ser tomadas, conforme os Passos 1 e 2, à seguir:

PASSO - 1: Medida da Testa

Medir a largura da testa do animal, tomando a medida desde a borda externa de um olho até a borda externa do outro, e anote o valor. Ver Figura-1.

PASSO - 2: Medida da Cabeça

Medir o comprimento desde o topo da cabeça até a ponta do lábio superior. Ver Figura2.

Figura-1
MEDIDA DA TESTA



Figura-2
MEDIDA DA CABEÇA



PASSO - 3: Seleção do Tamanho

Selecione o tamanho de acordo com os valores da Tabela-1, abaixo.

Tabela - 1: Seleção do Tamanho

TAMANHO	MEDIDA DA TESTA (CM)	MEDIDA DA CABEÇA (CM)
POTRO (FOAL)	19 - 22	41 - 49
PONEI (PONY)	22 - 31	50 - 63
PEQUENO-MÉDIO (COB)	32 - 34	67 - 69
GRANDE	36 - 38	74 - 76
EXTRA GRANDE	40 - 43	76 - 83

IMPORTANTE: caso as medidas da Testa e da Cabeça, não correspondam ao indicado na Tabela-1, aplique a seguinte regra:

- Para, **Equivizor RACING**, **Equivizor RECOVERY** e **Equivizor FLY Básica** (sem protetor de focinho), utilize a **Medida da Testa** para selecionar o tamanho correto.
- Para **Equivizor ANESTHESIA**, **Equivizor TRANSPORT** e **Equivizor FLY** (com protetor de focinho), utilize a **Medida da Cabeça** para selecionar o tamanho correto.