

GUIA DE MEDIDAS VISEIRA NOVAGUARD


GUIA DE MEDIDAS

Apresenta passo a passo as instruções para a escolha do tamanho da Viseira NOVAGUARD, para as diversas raças de cães.

PASSO - 1: Medida do Focinho (comprimento do focinho)

Tomando como base a parte posterior da orelha, trace uma linha imaginária de uma orelha até a outra. O Ponto Médio é definido como o ponto central da linha imaginária, conforme indicado na Figura-1. Desde o Ponto Médio, em linha reta, tome a medida até a Ponta do Nariz. A medida obtida representa a Medida do Focinho, que é utilizada como referência para definir o tamanho da Viseira NOVAGUARD, conforme Tabela-1, abaixo:

**Figura-1
MEDIDA DO FOCINHO**

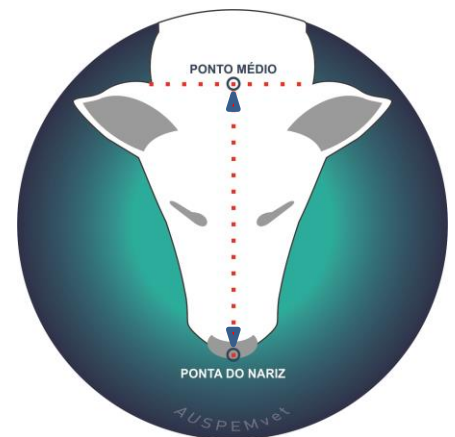

PASSO - 2: Definição do Tamanho

Para uma maior exatidão, o tamanho da Viseira NOVAGUARD é definido por dois critérios:

- Medida do Focinho: vide Tabela-1
- Peso do Animal: vide Tabela-2

NOVAGUARD - TABELA 1		MEDIDA DA CABEÇA (cm)					
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	< 11	11 a 13	13 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24
PO403	Mini						
PO404	Toy						
PO405	Pequeno						
PO406	Pequeno-Médio						
PO407	Médio						
PO408	Grande						

NOVAGUARD - TABELA 2		PESO (Kg)					
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	< 2	2 a 6	5 a 12	10 a 25	23 a 35	33 a 45
PO403	Mini						
PO404	Toy						
PO405	Pequeno						
PO406	Pequeno-Médio						
PO407	Médio						
PO408	Grande						

Com o uso das Tabelas 1 e 2, determine o tamanho da Viseira NOVAGUARD e o Código do Produto correspondente. Caso as Tabelas 1 e 2 indiquem dois tamanhos diferentes, selecione a viseira que apresentar o menor tamanho.

Cão de FOCINHO LONGO

Para cães de Focinho Longo (GreyHoung, Dashound Galgo Espanhol,...), siga o Passo-1 acima, tomando a Medida do Focinho. Com a medida em mãos, utilize a Tabela-3 ao lado, definindo o tamanho da Viseira NOVAGUARD e o Código do Produto correspondente.

TABELA 3 - MEDIDA DO FOCINHO (CM)		MEDIDA DO FOCINHO (CM)			
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	12-15	15-17	17-20	20-23
POWG0	Toy				
POWG1	Pequeno				
POWG2	Pequeno-Médio				
POWG3	Médio				

IMPORTANTE:

- A diversidade de raças e de cães mestiços (sem raça definida) torna impossível estabelecer um critério único para a definição do tamanho das Viseiras NOVAGUARD. Assim, as medidas constantes nas Tabelas 1, 2 e 3, apresentadas nesse guia auxiliam na definição do tamanho, entretanto não garantem a seleção do tamanho correto da Viseira NOVAGUARD.

- Para a definição do tamanho adequado, procure a assistência do seu Médico Veterinário ou de profissional devidamente treinado.
- Para raças como o Shih Tzu, Lhasa, Maltês,..., dada a grande quantidade de pelos na parte frontal (franja) e ao redor dos olhos, recomendamos que os mesmos sejam tosados para um melhor encaixe e estabilidade da viseira e também para que não cubram ou penetrem nos olhos.

Em caso de dúvidas, favor, entre em contato com a AUSPEMvet: contato@auspemvet.com.