

GUIA DE MEDIDAS VISEIRA OPTIVIZOR

GUIA DE MEDIDAS

Apresenta passo a passo as instruções para a escolha do tamanho da Viseira OPTIVIZOR, para as diversas raças de cães, conforme o tipo de focinho: **Focinho Médio**, **Focinho Longo** e **Focinho Curto**.

a) Cão de FOCINHO MÉDIO

PASSO - 1: Medida do Focinho (comprimento do focinho)

Tomando como base a parte posterior da orelha, trace uma linha imaginária de uma orelha até a outra. O Ponto Médio é definido como o ponto central da linha imaginária, conforme indicado na Figura-1. Desde o Ponto Médio, em linha reta, tome a medida até a Ponta do Nariz. A medida obtida representa a Medida do Focinho, que é utilizada como referência para definir o tamanho da Viseira OPTIVIZOR, conforme Tabela-1, abaixo:

PASSO - 2: Definição do Tamanho

Para uma maior exatidão, o tamanho da Viseira OPTIVIZOR é definido por dois critérios:

- Medida do Focinho: vide Tabela-1
- Peso do Animal: vide Tabela-2

**Figura-1
MEDIDA DO FOCINHO**

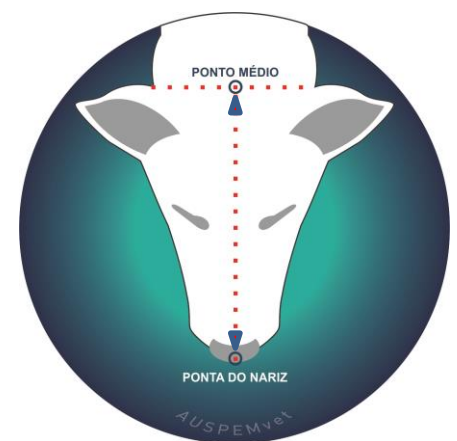


TABELA 1 - MEDIDA DO FOCINHO (CM)		MEDIDA DO FOCINHO (CM)						
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	9,5-11	12-15	16-18	19-21	22-24	25-27	>28
PO409	Mini							
PO410	Toy							
PO411	Pequeno							
PO412	Pequeno-Médio							
PO413	Médio							
PO414	Grande							
PO415	Extra Grande							

TABELA 2 - PESO (KG)		PESO (KG)						
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	< 2	2-6	5-12	10-25	23-35	33-45	>46
PO409	Mini							
PO410	Toy							
PO411	Pequeno							
PO412	Pequeno-Médio							
PO413	Médio							
PO414	Grande							
PO415	Extra Grande							

Com o uso das Tabelas 1 e 2, determine o tamanho da Viseira OPTIVIZOR e o Código do Produto correspondente. Caso as Tabelas 1 e 2 indiquem dois tamanhos diferentes, selecione a viseira que apresentar o menor tamanho.

Exemplo:

- Medida do Focinho: 20cm - Tamanho Pequeno-Médio e Código/Produto PO412.
- Peso: 9kg - Tamanho Pequeno e Código/Produto PO411.
- Tamanho ideal: Tamanho Pequeno e Código do Produto PO411.

b) Cão de FOCINHO LONGO

Para cães de Focinho Longo (GreyHound, Dashound Galgo Espanhol,...), siga o Passo-1 acima, tomando a Medida do Focinho. Com a medida em mãos, utilize a Tabela-3 ao lado, definindo o tamanho da Viseira OPTIVIZOR e o Código do Produto, correspondente.

TABELA 3 - MEDIDA DO FOCINHO (CM)		MEDIDA DO FOCINHO (CM)			
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	12-15	15-17	17-20	20-23
POWG0	Toy				
POWG1	Pequeno				
POWG2	Pequeno-Médio				
POWG3	Médio				

c) Cão de FOCINHO CURTO

Cães de Focinho Curto (Pug, Shih Tzu, Bulldog...) requerem maior atenção, pois tais raças apresentam peculiaridades como: focinho chato (nariz junto à face - Shih Tzu, Pug,...), focinho com nariz levemente protuberante (Lhasa, Maltês,...), ponta do nariz próximo à linha dos olhos, circunferência do pescoço maior que o da cabeça (típico do Pug), etc... Por esta razão, a medida da Circunferência da Cabeça é a que melhor se aplica na definição do tamanho da Viseira OPTIVIZOR.

Assim, tome a Medida da Circunferência da cabeça, tendo como referência o MEIO DAS ORELHAS, seguindo ao redor do pescoço, passando atrás da mandíbula, conforme indicado na Figura-2, a seguir.

Tome a medida justa, apertada e sem folgas, desprezando as orelhas. Com a medida, utilize a Tabela 4 e determine o Tamanho e o Código do Produto.

**Figura-2
MEDIDA DA CIRCUNFÊNCIA**



		MEDIDA DA CIRCUNFÊNCIA DA CABEÇA (CM)								
CÓDIGO/PRODUTO	TAMANHOS	28-30	30-32	32-34	35-38	39-43	44-48	49-55	56-60	> 60
POP000	Tiny									
POP00	Mini Mini									
POP0	Mini									
POP1	Toy									
POP2	Pequeno									
POP3	Pequeno-Médio									
POP4	Médio									
POP5	Grande									
POP6	Extra Grande									

IMPORTANTE:

- A diversidade de raças e de cães mestiços (sem raça definida) torna impossível estabelecer um critério único para a definição do tamanho das Viseiras OPTIVIZOR. Assim, as medidas constantes nas Tabelas 1, 2, 3 e 4, apresentadas nesse guia auxiliam na definição do tamanho, entretanto não garantem a seleção do tamanho correto da Viseira OPTIVIZOR.
- Para a definição do tamanho adequado, procure a assistência do seu Médico Veterinário ou de profissional devidamente treinado.
- Para raças como o Shih Tzu, Lhasa, Maltês,..., dada a grande quantidade de pelos na parte frontal (franja) e ao redor dos olhos, recomendamos que os mesmos sejam tosados para um melhor encaixe e estabilidade da viseira e também para que não cubram ou penetrem nos olhos.

Em caso de dúvidas, favor, entre em contato com a AUSPEMvet: contato@auspemvet.com.